

New  
新商品



OCC

Switzerland

Oro Clean Chemi AG (スイス)

ドイツ応用衛生協会  
認定品

Listed in DGHM-List

スイス生まれの院内感染制御シリーズ

# ASEPTOPRINT® Liquid

アセプトプリント・リキッド

印象・義歯・リテーナー洗浄除菌液

## 用途

印象面、印象トレー、矯正装置、ワックスバイト、シリコンバイト、などの除菌洗浄

## 使用方法

- 水970mlに対して原液30mlを希釈させ、溶液を作製する。
- 印象を採取後、印象体を水洗いすることなく、印象全体が溶液に浸るよう1分間浸漬させてください。
- 1分経過後は表面を丁寧に水洗いし、石膏を流してください。  
シリコン印象材、アルジネート印象材にも適用できます。

## 主成分

塩化ベンザルコニウム、界面活性剤、洗浄促進剤

## 〈注意事項〉

- 10分以上の浸漬をさせた場合、寸法変化が起こる可能性があります。
- 液は汚染度の度合いに応じて交換してください。  
(推奨交換目安2~3日、最長7日間)



使用手順


希釈



3%希釈

30ml + 970ml  
1分

浸漬

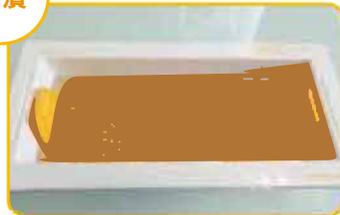

水洗いせずに印象全体を浸漬させる

水洗い



1分後に取り出し十分に水洗後に石膏を流す

 佐藤歯材株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-3

T. 03-3833-3986

F. 03-3833-3989

e-mail: info@satoushizai.co.jp

URL <http://www.satoushizai.co.jp>



ご用命は

製造元: Oro Clean Chemi AG(スイス)

OCC Switzerland | オロクリーンケミ社(スイス)は、院内感染予防製品のバイオニアとして欧州を中心に世界各国で高く評価されておりドイツの衛生管理製品の第三者認定機関であるDGHM(ドイツ応用衛生協会)の認可、推奨を取得した製品です。