

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
一般医療機器 歯科用カーバイドバー 16668000（JMDNコード）

【G&Z クラウンカッター】

【禁忌・禁止】


〔適用対象〕

- ・本製品の原材料に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・本製品を再使用しないこと。

【形状、構造及び原理】

(1) 形状・構造

本製品の形状は以下の通り。

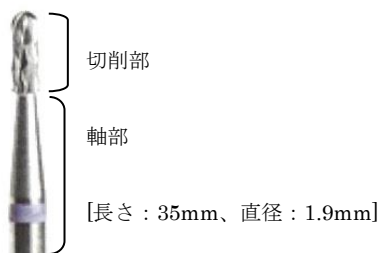

(2) 原理

本製品を歯科用ハンドピースに装着し、回転させることで、金属、プラスチック、陶材、補綴物を除去することができる。

【使用目的又は効果】

本製品は、タングステンカーバイト製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の補綴物を除去するために使用する。

【使用方法】

- (1) ハンドピースに装備する。
- (2) 本製品を回転させ、断続的に被切削物に押し付けて研削する。
- (3) 許容回転数内 45,000 - 88,000(回/分)で使用する。

【保管方法及び有効期間等】

- ①本製品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ②水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない環境で保管すること。
- ③腐食や劣化を促進させるような薬品（塩素系薬剤やアルデヒド系薬剤）と接触させないこと。また、消毒剤が規定する浸漬時間を厳守し、必要時間以上の浸漬を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：佐藤歯材株式会社
住所：東京都台東区東上野 1-15-3 佐藤ビル
電話番号：03-3833-3986

製造業者

名称：スイス プレシジョン インストルメンツ
エーゲー
Swiss Precision Instruments AG
(国名：スイス)

取扱説明書を必ずご参照ください